



Skelagervej 598, 8200 Århus N

TLF: (45) 86 109567
Mobil: (45) 40 345330
madsens@madsens.dk
www.madsens.dk

Brugsanvisning *Klikletten*

Ved hjælp af klikletten kan patienten/klienten trække sig op til siddende stilling på sengekanten.



Indstil klikletten på aluklodsens.
Peger pilene mod fodenden
Kan klienten komme op



Klienten tager fat i bøjlen med evt. begge hænder.



Klienten skubber bøjlen så langt frem som muligt.



Klienten trækker sig op ved egen kraft

Hvis klienten ikke har gode mavemuskler kan det hjælpe at hæve hovedgærdet.





Skelagervej 598, 8200 Århus N

TLF: (45) 86 109567
Mobil: (45) 40 345330
madsens@madsens.dk
www.madsens.dk

Klienten løfter sit yderste ben ud af sengen.
PS. Hvis klienten ikke kan flytte benene kan en hjælper gøre det eventuelt med et stykke spilerdug.



Klienten kan nu med bøjlens hjælp, komme op at stå.




Klienten kan stå ved klikletten.



Når klienten skal tilbage i seng drejes håndtagene på klikletten så.

Pilene vender mod hovedpuden skal klienten i seng og den kører modsat.

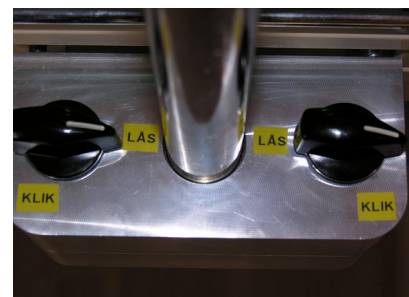



Skelagervej 598, 8200 Århus N

TLF: (45) 86 109567
Mobil: (45) 40 345330
madsens@madsens.dk
www.madsens.dk

Hvis patienten/klienten er uden benkræfter, men har gode armkræfter kan klikletten anvendes sammen med 1 hjælper.

Hjælperen trækker benene ud over sengekanten mens patienten/klienten trækker sig op ved hjælp af klikletten og derved kommer op at sidde på sengekanten.
Er benene tunge kan det anbefales at bruge spilerdug mm.